

Anbindungsbeschreibung Rodatest 300

Sehr geehrte/r SAmAs Kundin und Kunde,

in dieser Anbindungsbeschreibung finden Sie alle wichtigen Dinge und Informationen, um die Software Rodatest 300 mit SAmAs zu verbinden. So können Sie auf einfachem Wege den Sehtest Ihrer Probanden im Befundbaum in SAmAs dokumentieren.

Ihr SAmAs TEAM

Inhaltsverzeichnis

Informationen	4
Voraussetzungen.....	4
Allgemeiner Ablauf	4
Konfiguration Gerätesoftware	5
Anbindung an SAmAs	6
1.1 Information	6
1.2 Geräteanbindung	6
Abbildungsverzeichnis	8
Tabellenverzeichnis	8

Informationen

Voraussetzungen

- Die Gerätesoftware muss auf den entsprechenden PCs installiert sein.
- Die Installation der Gerätesoftware erfolgt immer durch den Kunden oder dessen IT-Dienstleister. SAmAs ist für die Installation und Konfiguration der Gerätesoftware nicht verantwortlich.

Allgemeiner Ablauf

- Die Gerätesoftware muss auf dem jeweiligen PC installiert werden.
- Prüfen Sie in der Gerätesoftware, welche Pfade für die Eingangs- und Ausgangsdatei hinterlegt wurden.
- Es kann vorkommen, dass der GDT-Transfer in der Gerätesoftware erst aktiviert werden muss.
- Falls das Gerät einen PDF-Transfer ermöglicht, so muss auch der hierfür hinterlegte Pfad in der Gerätesoftware überprüft werden.
- Die Anbindung an SAmAs muss erfolgen. (Siehe Punkt 1.2 Geräteanbindung)

Hinweis: Die Pfade für Ein- und Ausgangsdatei als auch den PDF-Transfer, müssen in der Gerätesoftware und in SAmAs übereinstimmen. Sonst ist eine korrekte Korrespondenz zwischen den Systemen nicht möglich.

Konfiguration Gerätesoftware

1. Starten Sie unabhängig von SAmAs die Rodatest 300 Software.
2. Öffnen Sie die Konfigurationseinstellungen.

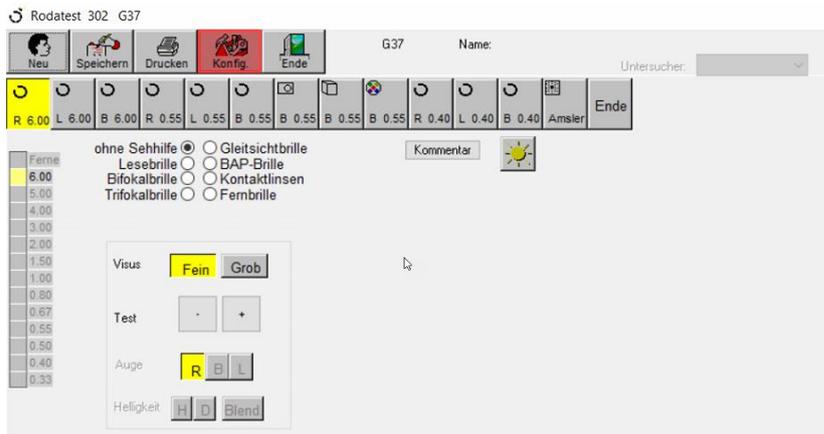


Abbildung 1: Konfigurationsschaltfläche Rodatest 300

3. Aktivieren Sie den GDT-Transfer und hinterlegen im Transferverzeichnis C:\GDT\RODATEST

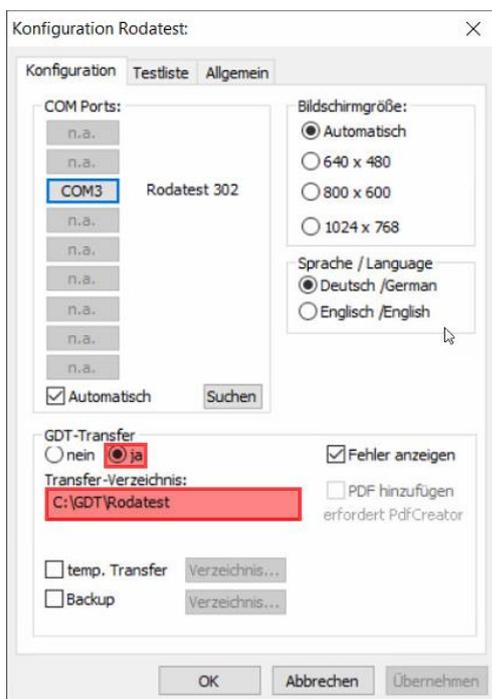


Abbildung 2: Konfiguration Rodatest 300

4. Verlassen Sie das Fenster über die Schaltfläche Übernehmen und dann OK.
5. Schließen Sie die Gerätesoftware Rodatest 300.

Anbindung an SAmAs

1.1 Information

Die Geräteeinstellungen werden pro Windows-Benutzer in der Registry abgelegt. Wenn Sie sich an dem betroffenen PC mit verschiedenen Windows-Benutzern anmelden um Untersuchungen durchführen, denken Sie bitte daran, die Geräteanbindung aus Punkt 1.2 pro Windows-Benutzer durchzuführen!

1.2 Geräteanbindung

- Bitte klicken Sie in SAmAs auf Daten → System → Geräteeinstellungen. Das Geräteschnittstellenfenster öffnet sich.

Hinweis: Falls der Menüpunkt System oder Geräteeinstellungen nicht sichtbar ist, kann dies an fehlenden Berechtigungen liegen oder Sie befinden sich im Offlinebetrieb. (nur bei eingerichteter Replikation)

- Klicken Sie auf Sehtest und geben Sie die Gerätebezeichnung anhand folgender Abbildung ein.

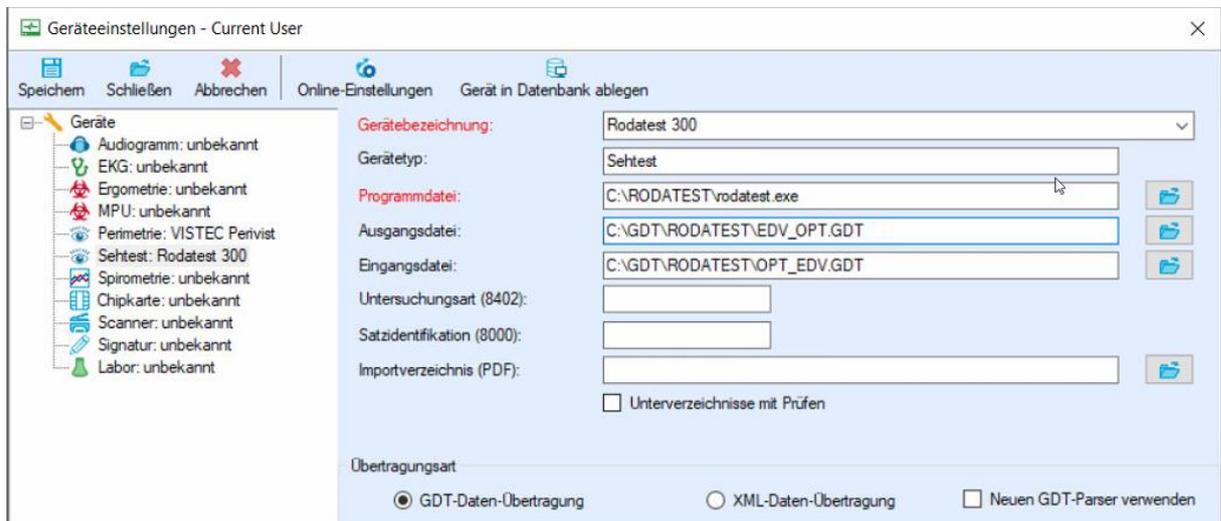


Abbildung 3: Geräteeinstellungen Rodatest 300

Hinweis: Bitte achten Sie darauf, den Dateinamen genau so wie unter Abbildung 3 gezeigt einzutragen. **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.** Wichtig ist hier auch die Groß- und Kleinschreibung!

Gerätebezeichnung	Rodatest 300
Gerätetyp	Sehtest
Programmdatei	C:\RODATEST\rodatest.exe
Ausgangsdatei	C:\GDT\RODATEST\EDV_OPT.GDT
Eingangsdatei	C:\GDT\RODATEST\OPT_EDV.GDT
Importverzeichnis PDF	
Übertragungsart	
Neuen GDT-Parser verwenden	<input type="checkbox"/>

Tabelle 1: Geräteeinstellung Rodatest 300

- Nach erfolgreicher Eingabe wählen Sie die Schaltfläche „Gerät in Datenbank ablegen“ aus und klicken dann anschließend auf die Schaltfläche „Speichern“.
- Öffnen Sie nun im Befundbaum eines ausgewählten Probanden den Eintrag Sehtest. Es wird Ihnen nachfolgendes Fenster angezeigt:

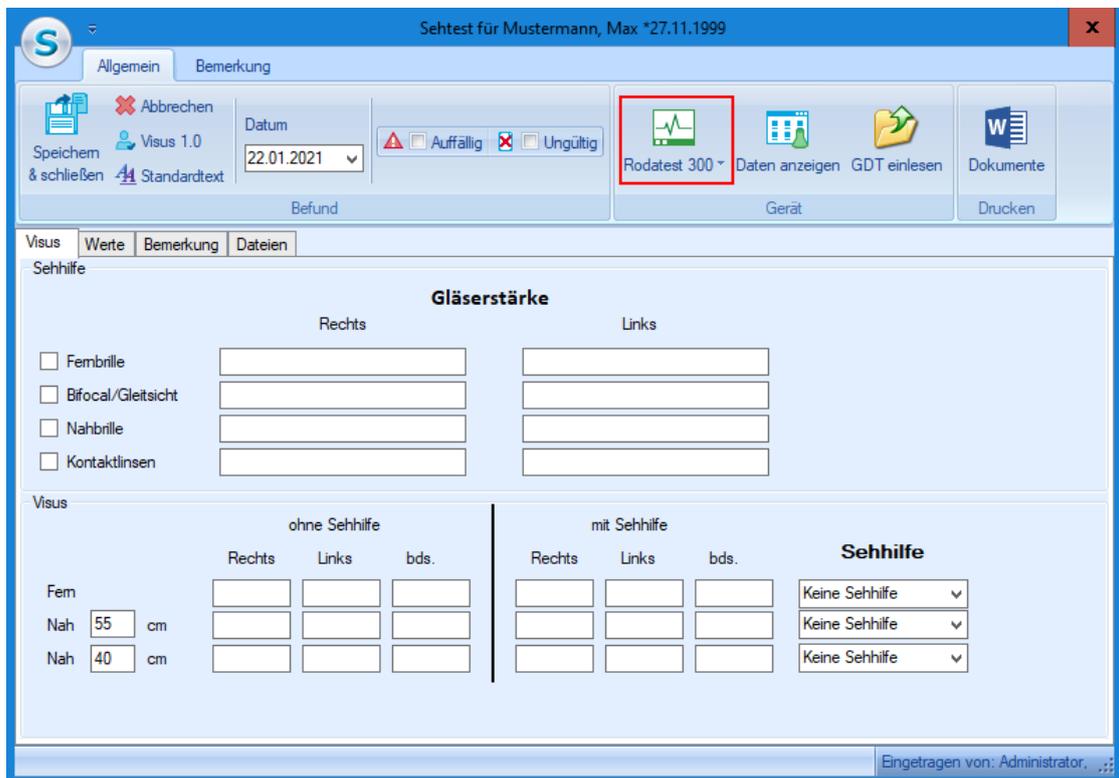


Abbildung 4: Neuer Befundeintrag Sehtest

- Starten Sie die Gerätesoftware durch Betätigen der Schaltfläche .
- Führen Sie die Untersuchung innerhalb der Gerätesoftware durch.
- Nach dem Speichern der Daten in der Gerätesoftware, werden die Daten automatisch nach SAmAs übertragen und in die oben gezeigte Sehtest Befundmaske eingetragen.
- Schließen Sie die Sehtest Befundmaske über die Schaltfläche **Speichern & Schließen**

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Konfigurationsschaltfläche Rodatest 300	5
Abbildung 2: Konfiguration Rodatest 300	5
Abbildung 3: Geräteeinstellungen Rodatest 300	6
Abbildung 4: Neuer Befundeintrag Sehtest	7

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Geräteeinstellung Rodatest 300	7
---	---

Haftungsausschluss

Änderungen der Produktnamen, Produktspezifikationen und Produktfunktionen vorbehalten. Die Verwendung der Software von SAmAs GmbH erfolgt unter Lizenz. Alle Rechte vorbehalten. Die in diesem Dokument verwendeten Soft- und Hardwarebezeichnungen und Markennamen der jeweiligen Firmen unterliegen dem allgemeinen Warenzeichen-, Marken- oder patentrechtlichem Schutz.

Änderungen am vorliegenden Dokument vorbehalten. Das vorliegende Dokument darf weder ganz noch teilweise vervielfältigt, in einem Datenabfragesystem gespeichert oder anderweitig auf elektronische oder mechanische Weise oder per Fotokopie, Aufnahme, Scannen oder Ähnliches übertragen werden.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte info@samas.de.

SAmAs GmbH
Technologiepark 9
33100 Paderborn
Deutschland

Telefon: +49 (5251) 20565-0
Fax: +49 (5251) 20565-20
E-Mail: info@samas.de
Web: www.samas.de

© 1993 - 2021 SAmAs GmbH, Paderborn, Deutschland